

# #2000 SEMTRAC 2000 Set W

胚胎移植导管

# 2000Semtrac W-240/ #2000Semtrac W-180 #2000B W-180 / #2000B W-240



灭菌

环氧乙烷

使用前请阅读以下重要内容:

**一次性使用——使用一次后请将其丢弃**

**灭菌: 包装袋打开或破坏后产品将不是灭菌状态**

**注意: 联邦(美国)法律规定此仪器仅销售给内科医生或其同行人士**

**产品描述:**

#2000SEMTRAC Set W导管套(包括#2000SEMTRACW-A宫颈套管和#2000SEMTRACSet W-C移植导管两种)是一种仅一次性使用、软质、富有弹力的无菌导管组合。#2000SEMTRAC SetW-A有一个特制的圆尖头,以保证顺利插入,避免损伤宫颈。其轴心上从末端尖头开始标有1-7cm的墨记,以便在宫颈中正确定位。#2000SEMTRAC SetW-C导管有一个特制的圆形、柔软、呈弹头状的尖头,可将损伤降到最低,其近端的墨记则用以表示移植导管移向#2000SEMTRAC Set W-A导管尖头的距离。

#2000SEMTRAC Set W-C导管完全插入后,富有弹力的管道末端约5cm显露在外。

Semtrac-B有一个由塑料管保护的易弯曲的不锈钢杆,其可以对Semtrac -A进行预定型处理。它的柔软的可弯曲头部可伸出Semtrac -A远端以保证移植的安全性。塑料管伸出不锈钢杆2.5mm。

#2000SEMTRAC SetW导管有以下二种类别:

产品	A 段长度(mm)	C 段长度(mm)	插入A 段的 C 段末端尖头显露在外的长度(mm)	
#2000SEMTRAC W-240	203,3	276,6	50	
#2000SEMTRACW-180	140,7	214,3	50	
产品	A 段内/外径(mm)	A 段末端尖头开口(mm)	C 段内/外径(mm)	C 段末端尖头(mm)
#2000SEMTRACW-240	2,05/2,55	1,75	0,70/1,70	0,5
#2000SEMTRACW-180	2,05/2,55	1,75	0,70/1,70	0,5

#Semtrac B

产品	长度 (mm)	管外径
#2000B B W-240	227.4	1.45
#2000B B W-180	164.89	1.45

**#2000SEMTRAC Set W-A 产品组成: 宫颈套管(白色把手)**

聚乙烯 标记: 墨水

**#2000SEMTRAC Set W-C 产品组成: 载物套管(粉色把手)**

导管: 聚亚安酯 把手: 聚碳酸酯 标记: 墨水

**Semtrac B 产品组成-心轴(蓝色把手)**

把手: 聚乙烯 管路: 聚乙烯 杆: 不锈钢

**使用说明:** 用于将胚胎导入子宫腔内。

**禁忌症:** 子宫颈感染时勿用。

勿用于盆腔炎患者或有盆腔炎病史者。

勿用于输卵管内的手术。

**警告:** 包装破损或打开后,产品将不是灭菌状态,应立即丢弃。

**注意:** #2000 SEMTRAC Set W 导管套柔韧性好,直径较小,从而进入子宫内时,子宫内壁穿孔的可能性可降到最低。但为了慎重起见,在插入导管前,应明确病人的子宫深度,有无子宫前屈和后屈的情况。(该事项最好在术前检查时进行,而非人工授精手术当天,从而最大限度地降低对子宫的伤害。)

如遇数位感应阻力,该仪器绝不能强行使用。

#2000 SEMTRAC SetW 导管套如果难以通入颈管,不可将该仪器强行插入。此时应考虑病态子宫颈狭窄的可能性。

**不良反应:** 目前尚未发现任何因使用 #2000 SEMTRAC Set W导管套引发的不良反应。然而,任何穿入子宫颈内的仪器,均可能出现轻微的绞痛。任何情况下都应严格遵照使用方法,并慎重考虑禁忌症和注意事项。

**制造商:** Gynetics Medical Products N.V.,Rembert Dodoensstraat 51,B-3920 Lommel, Belgium

**供应:** #2000SEMTRACW-240, #2000SEMTRACW-180

**包装:** 三盒装,每盒25支,分别进行无菌包装,采用一次性材料,有15个心轴。

**使用方法:**

- 病人置于切会阴卧位时,子宫颈显露在外,此时用阴道反射镜观察。
- 病人子宫深度和位置确定后,轻轻地将#2000 SEMTRAC SetW-A宫颈套管移到子宫颈外部,靠近颈管,进入子宫腔,感受到阻力时停止。
- 按照标准方案将胚胎导入#2000 SEMTRAC SetW-C移植导管。
- 将#2000 SEMTRAC SetW-C导管插入#2000SEMTRAC SetW-A导管。
- #2000 SEMTRAC SetW-C移植导管近端的墨记表示该导管已移向Semtrac W-A导管尖头的距离。
- 导管的末端尖头应处于宫底位置。
- 注意:** 插入导管过程中如遇困难,或导管难于弯曲,则轻轻旋转导管,向子宫颈靠近。如果子宫在前面或后面有明显伸缩,则需要使用夹钩轻轻地在子宫颈内牵引,以使导管全部插入。绝不能不顾阻力,强力将导管插入。
- 将胚胎慢慢释放到子宫。
- 胚胎完全释放后,将导管从子宫内慢慢抽出,并丢弃。移走反射镜,让病人休息。
- 套管一旦从病人体中移出,检视#2000 SEMTRAC SetW-C 移植导管,以确认胚胎是否释放。