

#4551 FAS SET

取卵针

CE
1639

无菌

R

使用前请阅读以下有关产品的重要内容：

一次性使用---使用一次后请将其丢弃

注意：联邦（美国）法律规定此仪器仅限于内科医生使用

灭菌有效期：5年

灭菌：除非包装破损或打开

产品描述：

4551 Fas Set取卵针是一种仅一次性使用的无菌不锈钢取卵针。

该取卵针使用超声引导的方法，用在体外受精和显微受精过程中经阴道获取卵母细胞。

4551 Fas Set取卵针有以下种类：

--单内腔（没有其他冲洗出口）

--单内腔（有冲洗出口）

--双内腔（针内含针，各针均有出口，用于冲洗和吸入）

取卵针长度不等，在300-515mm之间。

针规格为16, 17, 18和20。

针头可由不对称口针形状的斜面尖头或顶部切槽的斜面尖头获得，确保切面光洁。

针头有激光贴标，蚀刻贴标或浮雕贴标三种，用以实现显著的超声可视性。

不同长度和柔韧度的取卵针均有半透明管道，用作吸入和/或冲洗。

管路由鲁尔接头固定。

固定在吸入管上的锥形硅树脂软塞可轻易安装在小瓶上，并有大小不同的三种类型。

使用说明：

用于体外受精和显微受精过程中，经阴道获取卵母细胞。

禁忌症：

有（慢性）子宫颈感染时勿用。

勿用于盆腔炎患者或有盆腔炎病史者。

不适用于宫外孕。

警告：

术前请参考已出版医学文献资料。

注意：

不可在电感阻力情况下强行操作。

#4551 Fas Set操作不顺的情况下，不可强行操作。

不良反应：

目前尚未发现任何因使用#4551 Fas Set取卵针引发的不良反应。然而，使用任何损伤性仪器，均可能出现绞痛和轻微出血。任何情况下都应严格遵照使用方法，并慎重考虑禁忌症和注意事项。

制造商：

Gynetics Medical Products N.V.,
Rembert Dodoensstraat 51
B-3920 Lommel, Belgium

供应：

4551 FAS取卵针

包装：

二盒装，每盒15/25/20支，独立无菌包装，采用一次性材料。

使用方法：

1. 按规定操作，操作前应清洗。
2. 按规定操作，使用超声引导的方法抽取卵细胞。
3. 从细胞泡中取卵，并把卵子放入小瓶（#4551 Fas Set不提供小瓶）。
4. 从子宫取出#4551 Fas Set丢弃。让病人休息。